



Identifiez vous-même vos génisses vides quand vous le souhaitez !

Améliorez vos performances de reproduction avec le nouveau test de gestation

Alertys OnFarm



Réalisez facilement **les tests à la ferme** avec quelques gouttes de sang



Soyez libre de tester quand vous voulez **selon vos besoins**



Identifiez les génisses vides dès **28 jours** après fécondation



Des résultats fiables en **quelques minutes** pour une prise de décision rapide



>99%
fiable



25 % des troupeaux laitiers ont un âge moyen au premier vêlage supérieur à 35 mois.

(Données Reproscope 2022)

IDEXX

Test with Confidence™ Alertys™ On Farm Pregnancy Test

Le test de gestation Alertys™ OnFarm est facile à utiliser et facile à lire






Le test de gestation Alertys™ OnFarm détecte les glycoprotéines associées à la gestation (PAG) dans le sang total (EDTA) dès 28 jours suivant la reproduction et 70 jours suivant le vêlage.

Identifiez rapidement et avec fiabilité les génisses gestantes ou non gestantes quand vous le voulez directement dans votre exploitation.



Réalisez la prise de sang à la queue de la génisses. Retournez le tube (10 fois) immédiatement après la prise de sang.

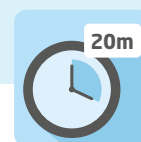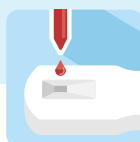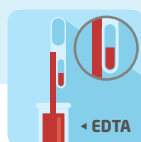

Suivez ces différentes étapes pour réaliser un test.

Vous pouvez exécuter plusieurs tests en même temps.

Résultats lisibles de 5 à 20 minutes.



A vous de prendre la décision :
Nouvelle mise à la reproduction • Synchronisation

Utilisez les tests pour identifier les génisses non gestantes dès aujourd'hui !

Contactez votre conseiller pour toute information.
www.test-gestation-alertys.fr



IDEXX

Test with Confidence™ Alertys™ On Farm Pregnancy Test